

Gebrauchsanweisung
Rollator XXL
Art.-Nr. G-223



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollator XXL. Der Rollator XXL ist für den In- und Outdoorbereich geeignet. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Rollator XXL auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben, um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Rollator XXL unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Bremsen.
- Achten Sie auf festen Sitz der Rückenlehne.
- Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als die eigene Schrittgeschwindigkeit. Sturzgefahr!
- Der Rollator XXL ist nur als Gehhilfe einer Person geeignet.
- Der Transport von Lasten oder Personen ist nicht erlaubt.
- Das Kippisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen beim Sitzen oder Beladung (Einkaufskorb) vergrößert werden.
- Beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.

Indikation

Der Rollator XXL dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit zur Unterstützung beim Gehen z. B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender sich bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren.

Kontraindikation

Die Verwendung des Rollator XXL ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit



Technische Daten

Farbe:	blau
Sitzplatte (B x T):	50 x 37 cm
Sitzhöhe:	56 cm
Sitzbreite:	60 cm
Schiebegriffhöhe:	85 – 96 cm
Gesamtbreite:	75 cm
Gesamtlänge/tiefe:	75 cm
Gesamthöhe:	96 cm
Zuladung Einkaufskorb:	5 kg
Eigengewicht:	12 kg
Maximale Belastbarkeit:	227 kg

Beschreibung des Rollator XXL



- ① Handgriff
- ② Bremse
- ③ Rückenlehne, gepolstert
- ④ Sitzplatte, hochklappbar
- ⑤ Einkaufskorb
- ⑥ Lenkräder
- ⑦ Laufräder

Bereifung: PU-Bereifung - Räder Ø 19,5 cm

Material: Stahlrahmen (blau lackiert), gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne

1 **Aufstellen**

Positionieren Sie Ihren Rollator XXL vor sich und betätigen Sie die Bremsen. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator XXL. Drücken Sie die Querstrebe nach unten und klappen Sie den Sitz nach unten. Nun können Sie den Einkaufskorb einhängen.




2 **Zusammenfallen**

Um Ihren Rollator XXL platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen. Nehmen Sie zuerst den Einkaufskorb ab. Klappen Sie den Sitz nach oben und ziehen Sie die Querstrebe nach oben. Der Rollator XXL wird sich dabei zusammenfallen.



3 **Handgriffe montieren und Höhenverstellung**

Der Rollator XXL wird weitestgehend vormontiert geliefert. Entnehmen Sie die Schrauben und Sternmutter vom Rahmen. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen. Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden. Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit durch Einstecken der Schrauben und ziehen Sie die Sternmutter fest an. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.

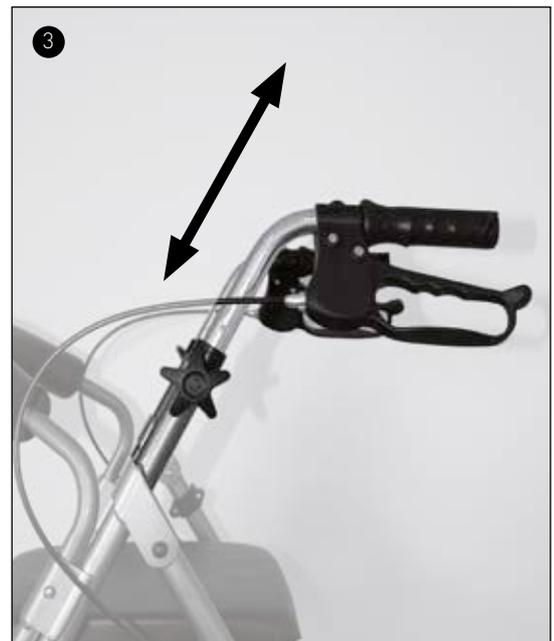



Gitterkorb montieren

Der Einkaufskorb kann unter der gepolsterten Sitzplatte eingehängt/angebracht werden.

Zuladung Einkaufskorb: 5 kg

Klappbare Sitzfläche

Unter der gepolsterten, klappbaren Sitzplatte befindet sich eine eingnähte Tasche mit Reißverschluss, zum Deponieren von Wertsachen etc.



Rückenlehne montieren

Die Rückenlehne sollten Sie nur montieren, wenn der Rollator XXL in sicherer Position steht und die Bremsen betätigt sind. Nehmen Sie die Rückenlehne und drücken Sie die Clipse rechts und links jeweils mit dem Zeigefinger hinein. Schieben Sie die Rückenlehne in die Führung. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht verkanten. Zum Entfernen der Rückenlehne gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Feststellbremsen

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt. Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus! Achtung! Jede Bremse wirkt nur auf ein Laufrad!



Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff. Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben. Ziehen Sie immer beide Bremshebel gleichzeitig und gleichmäßig, um beide Räder gleichmäßig zu bremsen.



Reinigung / Desinfektion

Der Rollator XXL sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen. Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden). Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche, verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Wiedereinsatz

Der Rollator XXL ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden. Der Rollator XXL sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Wartung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollator XXL einwandfrei funktionieren. Prüfen Sie, ob die Schrauben zur Fixierung des Sitzes am Auflagerrohr fest angezogen sind. Falls nicht, ziehen Sie die Schrauben bitte fest. Prüfen Sie, ob alle Steck- und Schnellverschlüsse richtig eingestellt und vollständig eingerastet sind. Prüfen Sie, ob alle Knöpfe der Steck- und Schnellverschlüsse sich einwandfrei lösen und wieder fixieren lassen. Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollator XXL müssen sofort ersetzt werden.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.





Ersatzteile

Folgende Einzelteile können zum G-223 separat bestellt werden:

- | | |
|--|--|
| ① Z-223-4 Griff links | ⑫ Z-223-21 Flügelmutter |
| ② Z-223-5 Griff rechts | ⑬ Z-223-28 Gegenschraube für Flügelmutter |
| ③ Z-223-14 Bremshebel links | ⑭ Z-223-16 Seilzug für Bremse |
| ④ Z-223-15 Bremshebel rechts | ⑮ Z-223-19 Schlauch für Bowdenzug |
| ⑤ Z-223-18 Stift für Bremshebel links | ⑯ Z-223-26 Halterung für Bowdenzug |
| ⑥ Z-223-27 Stift für Bremshebel rechts | ⑰ Z-223-20 Verbindung für Bowdenzug |
| ⑦ Z-223-17 Feder für Bremshebel | ⑱ Z-223-12 Bremsklotz |
| ⑧ Z-223-9 Schraube für Bremsgehäuse | ⑲ Z-223-31 Fixierschraube für Seilzug für Bremse |
| ⑨ Z-223-8 Bremsgehäuse | ⑳ Z-223-32 Endkappe für Seilzug für Bremse |
| ⑩ Z-223-6 Griffstange links | ㉑ Z-223-2 Hinterrad |
| ⑪ Z-223-7 Griffstange rechts | |

CARELINE KG
Ottostr. 11
41540 Dormagen
info@careline.de

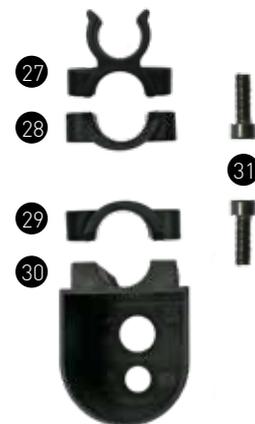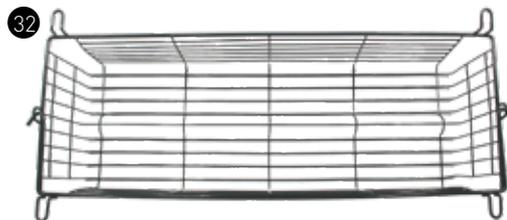

Ersatzteile

Folgende Einzelteile können zum G-223 separat bestellt werden:

- | | | | | | |
|----|----------|---|----|----------|--|
| 22 | Z-223-11 | Sitz | 29 | Z-223-23 | Befestigung für Gehstockhalter Unterteil |
| 23 | Z-223-29 | Befestigungsklammer für Sitz | 30 | Z-223-22 | Gehstockhalter Unterteil |
| 24 | Z-223-13 | Rückenlehne gepolstert | 31 | Z-223-30 | Schraubefür Gehstockhalter Ober-/Unterteil |
| 25 | Z-223-34 | Feder für Druckknopf für Rückenlehne | 32 | Z-223-1 | Einkaufskorb |
| 26 | Z-223-33 | Druckknopf für Rückenlehne | 33 | Z-223-10 | Schraubdeckel für Gabelachse |
| 27 | Z-223-24 | Gehstockhalter Oberteil | 34 | Z-223-3 | Gabel für Vorderrad |
| 28 | Z-223-25 | Befestigung für Gehstockhalter Oberteil | 35 | Z-223-2 | Rad (Vorder-/Hinterrad) |