

Dusch-Toilettenrollstuhl "Kakadu" 302018+302019 (und optionaler Montagesatz für 24" Räder 302017)

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält Informationen und Hinweise für einen korrekten und sicheren Gebrauch ihres "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhls.

Korrektter Gebrauch

Der Dusch-Toilettenrollstuhl ist ausschließlich zum Sitzen in Baderäumen oder in Duschen entworfen und kann auch als Toilette benutzt werden. Benutzen sie den "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl nicht als Steigehilfe!

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

2. Sicherheitshinweise

- benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand. Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber und beachten Sie die zulässige Traglast
- bitte nutzen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- steigen Sie nicht auf den Dusch-Toilettenrollstuhl (nur sitzen!)
- nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind
- benutzen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl nur auf geradem und festem Untergrund
- achten Sie bei der Benutzung des Dusch-Toilettenrollstuhls, sich nicht Finger oder andere Körperteile einzuquetschen
- sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung von allen Personen, die den Dusch-Toilettenrollstuhl verwenden, auch sorgfältig gelesen wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

3. Beschreibung und technische Daten

Zweckbestimmung

Der "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl besitzt alle Standard-Voraussetzungen eines regulären Dusch-Toilettenrollstuhls und dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschens. Durch die Pulverbeschichtung ist der Stuhl korrosions-beständig. Er ist einfach zu bedienen und für die Montage des Stuhls werden keine Werkzeuge benötigt. Der Stuhl ist bereits für die Anbringung des 24" Räder Kits vorbereitet. Zur Montage des optionalen 24" Räder Kits benötigt man einen 5er Innensechskant-schlüssel und einen 10er Schraubenschlüssel.

Technische Daten

Mobilex "Kakadu" Dusch- und Toilettenrollstuhl	"Kakadu" standard 302018	"Kakadu" breit 302019	Differenz bei montierten 24" Rädern
Sitzbreite	46 cm	51 cm	=
Sitztiefe	43 cm	43 cm	=
Sitzhöhe	49 - 54 cm einstellbar	49 - 54 cm einstellbar	=
Max. überfahrbare Höhe (WC)	42 - 47 cm einstellbar	42 - 47 cm einstellbar	=
Gesamtbreite (mit Armlehnen)	56 cm	61 cm	+ 8 cm
Gesamttiefe	93 cm	93 cm	+ 20 cm
Gesamthöhe	98 - 103 cm einstellbar	98 - 103 cm einstellbar	=
Max. Belastbarkeit	130 kg	150 kg	=
Gesamtgewicht	12,90 kg	13,50 kg	+ 2,90 kg

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich vorne an der unteren Querstrebe

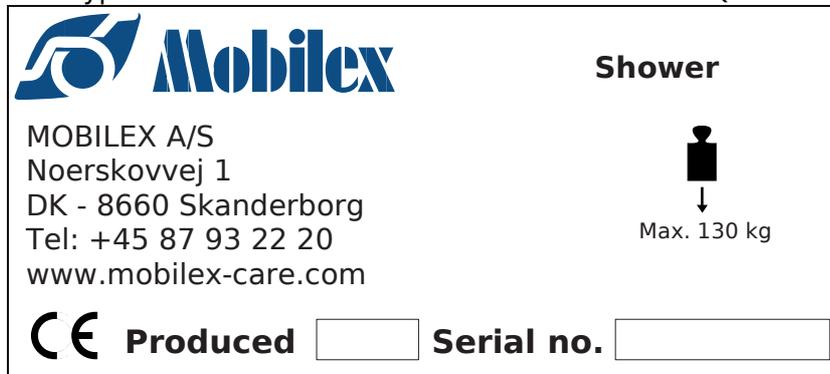


Bild des Typenschildes (*nicht originales Beispiel*)

4. Anwendungshinweise

Benutzung der Bremsen

- die Bremsen immer einsetzen, wenn sie den Stuhl nicht bewegen wollen
- lassen sie den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl nie ungebremst, wenn jemand auf ihm sitzt
- lassen sie den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl bei Gefällen nie ungebremst stehen
- um die Bremse festzustellen, mit dem Fuß die Bremswippe an den Rädern fest-treten, bis diese einrastet (siehe Bild rechts)
- um die Bremsen zu lösen heben sie mit dem Fuß die Bremswippe an den Rädern an (siehe Bild rechts)



Bremse feststellen



Bremse lösen

Hochklappen der Armlehnen

- diese Funktion kann behilflich sein, dem Benutzer ein leichteres Ein- und Aussteigen in den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl zu ermöglichen
- das Kippen der Armlehnen ermöglicht eine einfachere Körperhygiene während des Duschens
- lassen sie den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl mit gekippten Armlehnen nie unbeaufsichtigt, wenn jemand ihn benutzt
- um die Armlehnen hoch zuklappen kippen sie die Armlehne nach hinten, indem sie sie vorne anheben (Bild 3)
- um die Armlehne wieder in die Ausgangsstellung zu bringen, kippen sie sie einfach wieder nach vorne, bis sie zum Gebrauch waagrecht fest sitzen (Bild 4)

Abnehmen und Anbringen der Fußbretter

- diese Funktion zusammen mit den hoch klappbaren Fußbrettern kann behilflich sein, dem Benutzer ein leichteres Ein- und Aussteigen in den Dusch-Toilettenrollstuhl zu ermöglichen
- es ermöglicht ebenso eine einfachere Körperhygiene während des Duschens
- bewegen sie den Dusch-Toilettenrollstuhl mit abgenommenen Fußbretter nicht, wenn jemand ihn benutzt. Beim Bewegen des Stuhls stellen sie die Füße des Benutzers immer auf die Fußbretter
- um die Fußbretter zu lösen und abzunehmen, drücken sie mit dem Daumen den Blockierhebel nach unten und drehen sie die Fußbretter nach außen (Bild 5)
- fassen sie das gelöste Fußbrett am oberen Rohr und ziehen sie es nach oben aus dem vorderen Rahmenrohr (Bild 6)
- um die Fußbretter wieder anzubringen und zu fixieren, stecken sie sie wieder in das Loch am vorderen Rahmenrohr und drehen sie nach innen, bis der Blockierhebel wieder einrastet.



Bild 5: Fußbrettblockierhebel



Bild 6: Rahmenrohrloch

Einstellung der Fußbretter auf die gewünschte Höhe

- die Höhe der Fußbretter des Dusch-Toilettenrollstuhls sollte an den Benutzer angepasst werden
- die Höhe ist korrekt eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Dusch-Toilettenrollstuhl sitzt, seine Oberschenkel auf dem Sitz korrekt aufliegen und beide Füße auf den Fußbrettern ruhen
- um die Höhe der Fußbretter einzustellen, nehmen sie diese vom Dusch-Toilettenrollstuhl ab
- entfernen sie die Fixierschraube (Bild 7)
- stellen sie die Höhe der Fußbretter ein, indem sie das interne Rohr im äußeren nach innen oder außen verschieben (Bild 8)
- setzen sie die Fixierschraube wieder ein und schrauben sie fest (Bild 9)



Bild 7: Fixierschraube lösen



Bild 8: Höhe einstellen



Bild 9: Schraube anziehen

Einstellung der gewünschten Sitzhöhe

- die Sitzhöhe sollte an den Benutzer angepasst werden. Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt, und beide Füße auf dem Boden stehen
- die Sitzhöhe nur einstellen, wenn niemand auf dem Stuhl sitzt
- zur Einstellung der Sitzhöhe entfernen Sie Schraube A. Nun lässt sich das Teleskop-Rohr mit dem 5" Rad im Rahmen bewegen und kann in der Höhe eingestellt werden (4 Positionen)
- bei Erreichen der gewünschten Höhe führen Sie die Schraube wieder in Loch A oder B (je nach Höhe) und befestigen sie mit der dazugehörigen Mutter
- stellen Sie alle 4 Teleskop-Rohre immer auf dieselbe Höhe ein!
- wenn der Stuhl mit 24" Hinterrädern bestückt ist (optional), muss auch die Höhe der Achsen der 24" Räder so eingestellt werden, dass die Sitzfläche eben und waagrecht ausgerichtet ist



Montage und Bedienung der Bremsen bei montierten 24" Hinterrädern (optional)

Dem 24" Räder Kit liegen 2 Feststellbremsen mit Halterung bei. Die Bremsen werden am Rahmen des Toilettenrollstuhles montiert (Bild unten) und dienen zum Feststellen der beiden Hinterrädern.



Bremse am Rahmen festklemmen



Bremse geöffnet




Bremse geschlossen

So sichern Sie Ihren "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl gegen ungewolltes Wegrollen: zum Feststellen des Rollstuhls, schieben sie den Bremshebel am rechten und linken Rad vorwärts bis zum Anschlag. Zum Lösen der Bremsen ziehen Sie beide Bremshebel wieder zurück.


ACHTUNG! Betätigen Sie die Bremsen immer an beiden Seiten des Dusch-Toilettenrollstuhls. Die Feststellbremsen sind nicht als Betriebsbremsen ausgelegt und dienen nur zum Feststellen des „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhles (Parkposition). Sie dürfen keinesfalls zum Bremsen während der Fahrt benutzt werden!

Benutzung des Toiletteneimers

- der Toiletteneimer ist für Personen gedacht, die Schwierigkeiten haben reguläre Toiletten zu benutzen
- um den Toiletteneimer zu benutzen entfernen sie die Sitzabdeckung (siehe Bild)
- entfernen sie den Deckel des Toiletteneimers
- nach Benutzung setzen sie den Deckel wieder auf den Toiletteneimer und entfernen sie diesen vom Dusch-Toilettenrollstuhl (siehe Bild)
- entleeren und reinigen sie den Toiletteneimer und setzen sie diesen wieder in den Dusch-Toilettenrollstuhl ein (siehe Bild)
- belassen sie den Toiletteneimer nie in vollem oder ungesäuberten Zustand
- decken sie den Toiletteneimer wieder mit der Sitzabdeckung ab

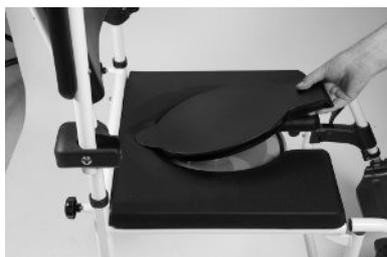

Abnehmen der Sitzabdeckung

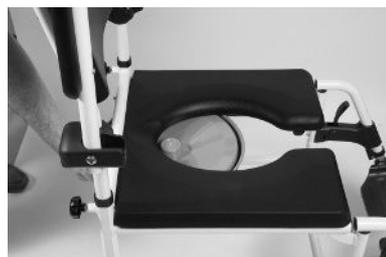

Eimer nach hinten entfernen



Eimer entleeren + reinigen

Anbringung eines Sicherheitsgurtes (optional)

Am "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl 302018 lässt sich ein Sicherheitsgurt einfach anbringen. Achten Sie darauf, dass der Gurt an den Gurt-Enden Schlaufen hat (z.B. Mobilex Gurt Art. Nr. 233012). Diese Schlaufen kann man einfach am Rahmen des Toilettenrollstuhles anbringen, indem man die Rückenlehne vom Toilettenrollstuhl abnimmt und die Schlaufen-Enden um das Rahmenrohr legt (siehe Bild). Achten Sie darauf, dass der Gurt mit dem Schließmechanismus nach vorne angebracht und nicht verdreht ist. Anschließend die Rückenlehne wieder auf den Dusch-Toilettenrollstuhl montieren und festschrauben. Fertig! Der Sicherheitsgurt ist montiert (siehe Bild).



Rückenlehne öffnen



Gurt fertig montiert

5. Wartung und Pflege

Reinigung

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel oder scharfkantigen Gegenstände).

Wartung: Der Mobilex "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl ist wartungsfrei

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark, erklärt hiermit, dass der

Mobilex "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl 302018 und 302019 (und das optionale 24" Räder Kit 302017)

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**
Anhang I vom 14 Juni 1993

Skanderborg, am 24.06.2008



Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S