

# INVACARE O<sub>2</sub>-APP

Kurzanleitung für iOS und Android



Frei atmen.  
Ganz leicht.

## Kurzanleitung

### Invacare O<sub>2</sub>-App für iOS und Android

- 1 Ein Apple®- oder Android-Smartphone oder -Tablet
- 2 Den **Registrierungslink** erhalten Sie per E-Mail von Ihrem Sauerstoffanbieter
- 3 Ihr Platinum Mobile-Sauerstoffkonzentrator muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein oder über eine ausreichend hohe Akkuladung verfügen.

## Bluetooth

- 1 Um Bluetooth **einzuschalten** (EIN), drücken Sie gleichzeitig die **Taste für die Display-Hintergrundbeleuchtung** und die **Taste für die Pulsmenge** am Platinum Mobile. Sobald Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Bluetooth-Symbol auf dem LCD-Display des Platinum Mobile angezeigt.
- 2 Um Bluetooth **auszuschalten** (AUS), drücken Sie gleichzeitig die **Taste für die Display-Hintergrundbeleuchtung** und die **Taste für die Pulsmenge**. Sobald Bluetooth ausgeschaltet ist, verschwindet das Bluetooth-Symbol.





**1**

### Kennwort erstellen

- Ihre Registrierung erfolgt über Ihren Sauerstoffanbieter. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Erstellung Ihres Kennwortes. Melden Sie sich auf Ihrem E-Mail-Konto an, öffnen Sie die E-Mail von Ihrem Anbieter, klicken Sie auf den Link und geben Sie die benötigten Informationen ein.

*Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, falls Sie nicht registriert wurden oder keine E-Mail mit einem Link für das Erstellen Ihres Kennworts erhalten haben.*



**2**

### Herunterladen der Piccolo O<sub>2</sub>-App

- Laden Sie die Piccolo O<sub>2</sub>-App von iTunes (iOS) oder Google Play (Android) herunter und aktivieren Sie Bluetooth (unter „Einstellungen“) auf Ihrem Smartphone.

**Starten Sie die Piccolo O<sub>2</sub>-App.**




**3**

### Melden Sie sich bei der Piccolo O<sub>2</sub>-App an

- Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr **Kennwort** ein und tippen Sie auf die Schaltfläche Anmelden.

*Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, falls Sie nicht registriert wurden oder keine E-Mail mit einem Link für das Erstellen Ihres Kennworts erhalten haben.*

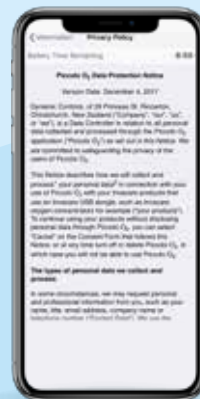

**4**

### Lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen

- Falls die aktuellen Datenschutzbestimmungen nicht akzeptiert wurden, werden sie jetzt angezeigt. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren, um die Datenschutzbestimmungen zu bestätigen.



5

**Verbindungscode erhalten**

- ▶ Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand gleichzeitig die Taste für die Display-Hintergrundbeleuchtung und die Taste für die Pulsmengenauswahl, **um den Verbindungscode für die Invacare O2-App zu erhalten.**

Ein 6-stelliger Code wird auf dem LCD-Display Ihres Platinum Mobile-Sauerstoffkonzentrators angezeigt.



6

**Verbindungscode eingeben**

- ▶ Geben Sie den 6-stelligen Code in Ihrer Piccolo O2-App ein und tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.



7

**Auf Verbindung warten**

- ▶ Die App stellt jetzt eine Verbindung mit Ihrem Platinum Mobile Sauerstoffkonzentrator her. Während die Verbindung hergestellt wird, erscheint das **Bluetooth-Symbol**:



Ihr Smartphone ist jetzt mit Ihrem Platinum Mobile-Sauerstoffkonzentrator verbunden.



8

**Benachrichtigungen erlauben**

- ▶ Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Senden von Benachrichtigungen für Ihren Platinum Mobile-Sauerstoffkonzentrator an Ihr Smartphone zuzulassen.

Tippen Sie auf **Erlauben**, um diese Funktion zu aktivieren.



9

**Erfolgreich!**

- ▶ **Das Einrichten ist abgeschlossen.**  
Sie sind startbereit!

# Invacare Piccolo O<sub>2</sub> App Kurzanleitung

**1**



## Pulsmengenanzeige

Zeigt die aktuelle Pulsmengen-Einstellung Ihres Platinum Mobile-Sauerstoffkonzentrators an.



## Anleitungen und Ressourcen

Tippen Sie auf das Menü für den Zugriff auf die

- ▶ Gebrauchsanweisung
- ▶ Health and Lifestyle-Community
- ▶ Videoressourcen

<https://oxygen-therapy.net/de/>

**2**



## Akkustand

Zeigt die Anzahl der installierten Akkus an. Für jeden Akku wird der Ladezustand angezeigt.

**3**

**6:59**

## Verbleibende Akkulaufzeit

Zeigt die verbleibende Zeit der Akkus in Stunden und Minuten an. Wenn Sie die Pulsmengen-Einstellung ändern, wird die verbleibende Zeit der Akkus neu berechnet.

## Verbindung wird hergestellt

Zeigt „Verbindung wird hergestellt“ an, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Platinum Mobile-Sauerstoffkonzentrators befinden.

Der Platinum Mobile muss sich in einer Entfernung von maximal 10 m (Sichtlinie) von Ihrem Smartphone befinden.



## Warnung wegen niedrigem Akkuladestand

Zeigt eine Warnung wegen geringer Akkuladung an, wenn die Restladedauer weniger als 30 Minuten beträgt.



# Informationsbildschirm

## Anleitungen und Ressourcen

► Über den Informationsbildschirm haben Sie Zugriff auf Anleitungen und Ressourcen, die Ihnen beim Umgang mit Ihrem **Platinum Mobile** helfen.

Über diesen Bildschirm können Sie auch **Informationen über Ihre Geräte und die App anzeigen und die Anzeige der Umweltinformationen steuern.**

1



### Menü

Tippen Sie auf das **Menü**, um den Informationsbildschirm zu öffnen.

2



### Über

Tippen Sie auf **Über**, um die Seriennummern und Softwareversionen des Produkts anzuzeigen.

3



### Umwelt- informationen

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Umweltinformationen**, um zu den Umweltinformationen zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.



4



### Kurzanleitung

Tippen Sie auf **Kurzanleitung**, um ein Video anzuzeigen, in dem das Einrichten und die Bedienung Ihres Platinum Mobile erläutert werden

5



### Gebrauchs- anweisung

Tippen Sie auf **Gebrauchsanweisung**, um die Platinum Mobile-Gebrauchsanweisung anzuzeigen.

6



### Community

Tippen Sie auf **Sauerstofftherapie für Zuhause**, um die Website der Health and Lifestyle-Community „Sauerstofftherapie für Zuhause“ anzuzeigen.

# Umweltinformationen

- **Umgebungsinformationen, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität für Ihren Standort, können auf dem Startbildschirm angezeigt werden.** Diese müssen hierzu auf dem Informationsbildschirm aktiviert werden.




**1**

Tippen Sie auf das Menü, um den Bildschirm „Informationen“ zu öffnen.



**2**

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Umweltinformationen“.

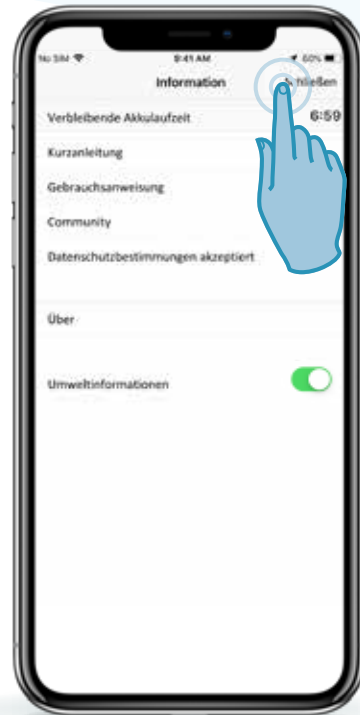

**3**

Schließen Sie den Bildschirm „Informationen“.

## Anmerkungen

- **Sie müssen die Ortungsdienste aktiviert haben,** damit die Umweltinformationen angezeigt werden. Die Ortungsdienste aktivieren Sie auf der Seite „Einstellungen“ Ihres Geräts, indem Sie auf „Datenschutz“ und dann auf „Ortungsdienste“ tippen. Tippen Sie dann auf dem Bildschirm „Ortungsdienste“ auf „Ortungsdienste“, um diese zu aktivieren. **Suchen Sie am Ende des Bildschirms „Ortungsdienste“ nach der Schaltfläche für die Piccolo O2-App, tippen Sie darauf und stellen Sie sicher, dass „Beim Verwenden der App“ aktiviert ist.**
- **Die Umweltinformationen stammen von externen Anbietern.** Wenn der externe Dienst oder die Informationen des externen Dienstes nicht verfügbar sind, werden auf dem Startbildschirm keine Informationen angezeigt und unter der Schaltfläche „Umweltinformationen“ wird folgende Meldung angezeigt: „Für Ihren Standort sind keine Informationen verfügbar“.



**Frei atmen.  
Ganz leicht.**

Alle Rechte vorbehalten. Marken sind durch <sup>™</sup> und <sup>®</sup> gekennzeichnet. Soweit nicht anders angegeben sind alle Marken Eigentum der Invacare Corporation bzw. derer Tochtergesellschaften oder werden von diesen in Lizenz genutzt. Google Play und Windows sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Inc. Das Wort und die Marke Bluetooth sowie zugehörige Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Apple, iOS und App Store sind eingetragene Warenzeichen von Apple, Inc. Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Absprache zu ändern.