


Pflegebetten für Kinder


...das Original!




Aufbauanleitung für Ihr
neues **Timmy** - Kinderpflegebett


KayserBetten

Rieper Straße 12
D-29683 Dorfmark
Telefon: 05163 / 6595
Telefax: 05163 / 2076
www.kayserbetten.de
info@kayserbetten.de

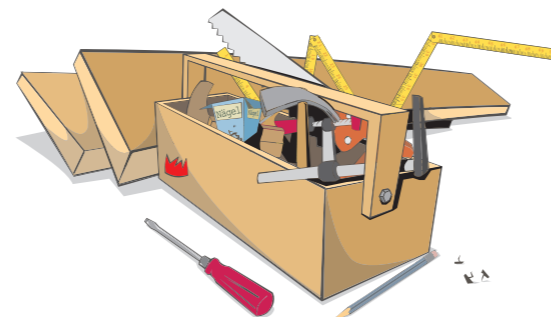

Revision: 1.0

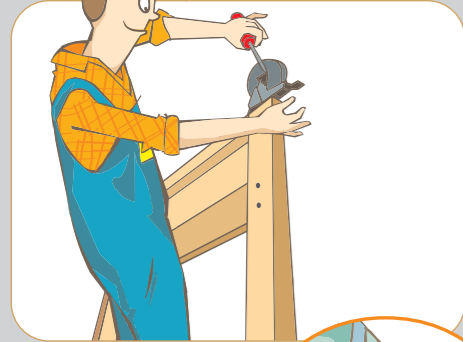

Das sind unsere Monteure Robert und Stefan. Sie werden Ihnen beim Aufbau Ihres KayserBettes behilflich sein!



Aufbauanleitung für Ihr neues Timmy - Kinderpflegebett

Die Montage muss auf ebener Fläche erfolgen.

Wenn Sie für das Bett einen Satz Bremsrollen bestellt haben, müssen diese als erstes in die unteren Bohrungen der Seitenrahmen eingeschraubt werden. (Darstellung oben links)

Legen Sie zunächst die Zargen ④ + ⑤ flach auf den Boden, um nach dem Einschleiben der Querbolzen ⑩ die Gewindestifte ⑪ einzuschrauben.

Stellen Sie einen Seitenrahmen ① auf. Montieren Sie zunächst die erste Zarge ⑤, indem Sie diese mit den Gewindestiften durch die unteren Bohrungen des Seitenrahmens stecken. Die Holzdübel müssen passgenau in die dafür vorgesehenen Bohrungen geführt werden. Verschrauben Sie die Zarge mit einer Messingkappe ⑫ handfest. Bereits jetzt steht die Konstruktion sicher!

Montieren Sie dann die zweite, untere Zarge ⑤.

Nun werden die Blenden ⑥ in die Nuten der montierten Zargen gesteckt. Führen Sie die oberen Zargen ④ mit den Gewindestiften in die oberen Bohrungen des Seitenrahmens. Die Auflageleiste der Zarge muss sich dabei innen und unten befinden. Verschrauben Sie die Zargen mit je zwei Messingkappen handfest.

Der zweite Seitenrahmen ① wird jetzt auf die insgesamt 6 freien Gewindestifte der Zargen geschoben und handfest verschraubt.




Das Bett steht nun sicher, so dass der Einlegerahmen ⑭ eingelegt werden kann! Entnehmen Sie zunächst die Steuergeräte der Verpackung. Greifen Sie zu zweit jeweils den Rahmen von innen, um ein späteres Einklemmen der Hände zu vermeiden. Der Einlegerahmen wird nun vorsichtig zwischen die Seitenrahmen geführt und auf den Holzleisten der Zargen abgelegt. (Bei elektromotorisch verstellbaren Einlegerahmen ist darauf zu achten, dass die Kabel mitgeführt werden, um ein Abquetschen zu vermeiden. Montieren Sie die Schaltbox ⑮ mit den mitgelieferten Schrauben ⑱ an der Außenseite eines Seitenrahmens (außerhalb der Erreichbarkeit des Patienten). Nähere Informationen zu Ihrem Einlegerahmen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung).

Jetzt werden die vier Absenkgritter ② + ③ von oben eingehängt. Durch die Betätigung der Verschlüsse (nach innen ziehen) können die Gitter auf unterschiedliche Höhen abgesenkt werden.

Setzen Sie nun noch die vier Zierköpfe ⑦ auf die Eckpfosten und schon ist Ihr neues Timmy-Bett fertig aufgestellt!

Teileliste und Explosionszeichnung Ihres neuen Timmy - Kinderpflegebettes

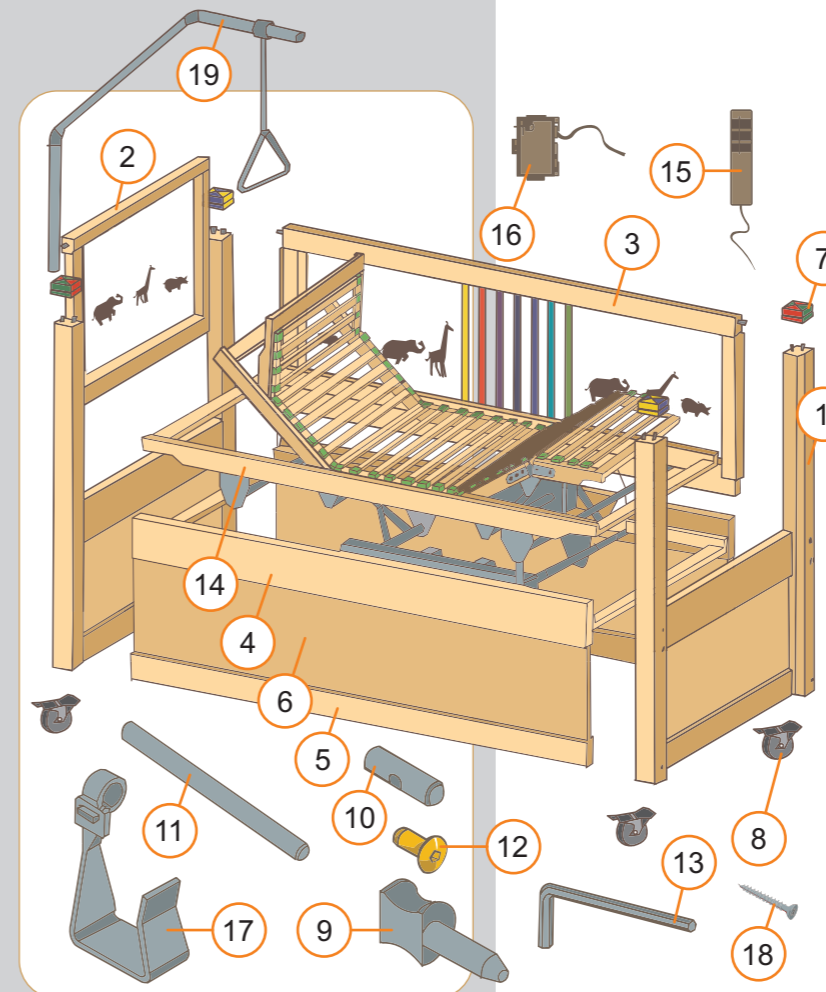

Pos.	Menge	Benennung
Holzumrandung		
1	2	Seitenrahmen
2	2	Absenkgritter kurz
3	2	Absenkgritter lang
4	2	Verbindungszargen 150mm
5	2	Verbindungszargen 90mm
6	2	Blenden
7	4	Zierköpfe
8	4	Räder
Beschläge		
9	2	Steckdübel
10	12	Querbolzen
11	12	Gewindestifte M8x140mm
12	12	Messingkappen
13	1	Inbusschlüssel
Einlegerahmen		
14	1	Einlegerahmen mit Lattenrost
15	1	Handschalter*
16	1	Sicherheitsschaltbox*
17	1	Halterung für Netzkabel*
18	2	Schrauben für Schaltbox*
*(Nur bei elektr. Einlegerahmen)		
Optional		
19	1	Aufrichter