

Aluminium-Rollator LR-X

Produktspezifikation



- 1 Handgriffe
- 2 Einstellbare Feststell-/Betriebsbremse
- 3 Nylon-Rückenlehne
- 4 Armlehnenrohrführung
- 5 Sitzfläche mit Zugband
- 6 Höhenverstellbare Rohrführungen
- 7 Einkaufstasche
- 8 Vorderräder/Lenkräder
- 9 Hinterräder

Technische Daten

Breite zwischen den Armlehnen:	45,7 cm
Sitzhöhe:	53,3 cm
Niedrigste Griffhöhe:	78,7 cm
Höchste Griffhöhe:	91,4 cm
Gesamtbreite:	67,3 cm
Gesamtlänge:	68,6 cm
Sitztiefe:	20,3 cm
Breite zusammengeklappt:	25,4 cm
Gewicht:	6,6 kg
Max. Belastbarkeit:	136 kg

Lieferumfang

Aluminium-Rollator LR-X
Einkaufstasche
Bedienungsanleitung

Indikation und Verwendungszweck

Der Aluminium-Rollator LR-X dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 136 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkte Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Die Einkaufstasche ist zum Transport von Gegenständen und Waren vorgesehen. Bitte nicht auf die Tasche setzen.

Der Rollator darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich.

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Durch technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen der in dieser Anleitung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor.

Bedienungsanleitung

Rollator aufstellen/entfalten

Stellen Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung und betätigen Sie die Feststellbremse. Drücken Sie mit beiden Händen die Seitenrohre der Sitzfläche links und rechts nach unten, bis der Klappmechanismus einrastet. Fassen Sie hierbei bitte nicht unter den Sitz, da Sie sich sonst die Finger klemmen könnten. Anschließend hängen Sie bitte die Einkaufstasche ein.

Griffhöhe einstellen

Die Handgriffe des Rollators können in der Höhe eingestellt werden, um sich der Größe des jeweiligen Benutzers anzupassen. Drücken Sie den Federknopf und stellen Sie die Griffe auf die gewünschte Höhe ein. Achten Sie bitte darauf, dass beide Handgriffe auf der gleichen Höhe eingestellt und sicher eingerastet sind.

Bremse

Betriebsbremse (beim Schieben): Ziehen Sie die Bremshebel nach oben.
Feststellbremse (beim Parken): Drücken Sie die Bremshebel nach unten.

Steighilfe

Durch Druck mit der Fußspitze auf den verlängerten Rahmen wird das Anheben der Lenkräder erleichtert.

Rollator falten

Nehmen Sie die Einkaufstasche vom Rahmen ab.
Ziehen Sie das Verriegelungsband in der Mitte der Sitzfläche nach oben – der Rollator faltet sich zusammen.

Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen an die Griffe – Kippgefahr!
Benutzen Sie auf abschüssigen Wegen die Betriebsbremse (ziehen Sie die Bremshebel nach oben).
Benutzen Sie den Rollator nur auf festem, ebenem Untergrund.
Bei zu starkem Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.
Beim Zusammenklappen und beim Entfalten des Rollators können Kleidungs- und Körperteile eingeklemmt werden.

Reinigung

Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden Sie hierzu eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze.
Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wartung

Der Aluminium-Rollator LR-X ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, bringen Sie den Rollator bitte zur Instandsetzung zu Ihrem Fachhändler.

TRENDMOBIL GmbH
Fohling 24
33106 Paderborn
Tel.: +49 (0)5254 94790
Fax: +49 (0)5254 9479499
E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler