
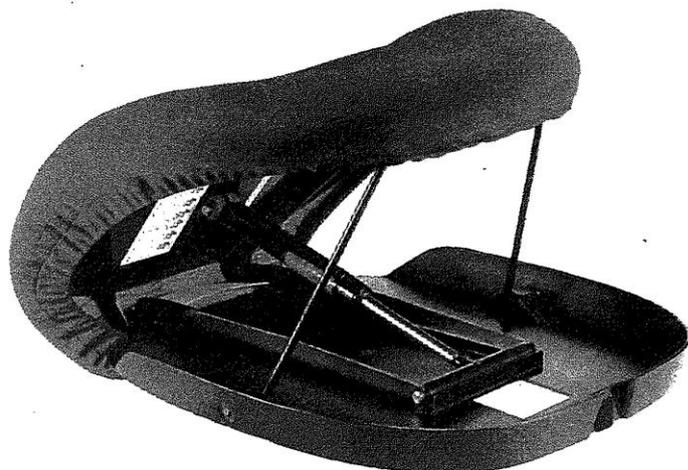





# *upeasy* Seat Assist™

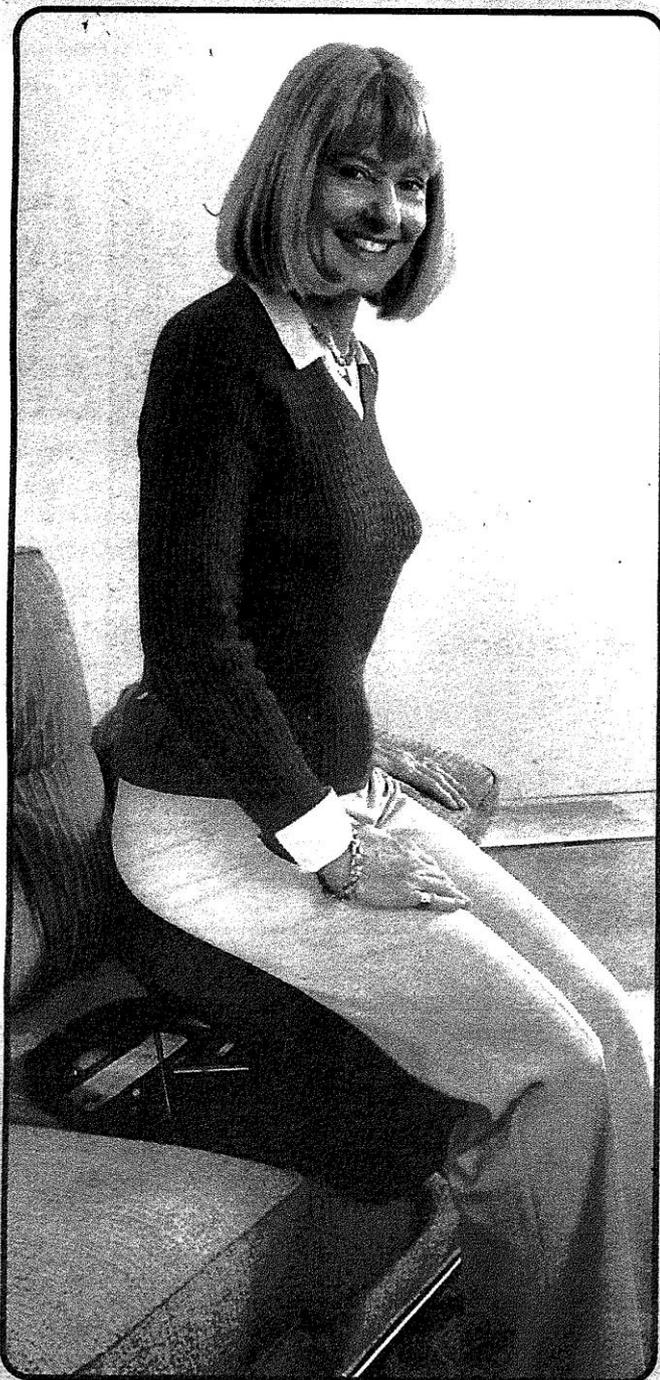

[www.upeasy.com](http://www.upeasy.com)



## Hinsetzen mit UPEASY

Nachdem Sie die Einstellung des Gewichts reguliert und UPEASY auf Ihrem Stuhl angebracht haben, setzen Sie sich auf den flachen Teil oben auf der UPEASY Sitzhilfe. UPEASY wird Sie langsam und vorsichtig in Ihren Stuhl gleiten lassen. (Hinweis: Wenn Ihr UPEASY sich nicht nach unten bewegt, wenn Sie sich auf ihn setzen, stellen Sie die Einstellung für das Gewicht auf einen niedrigeren Wert ein.)

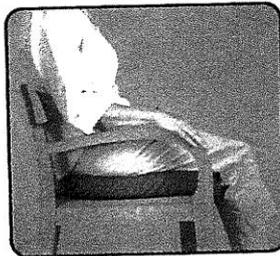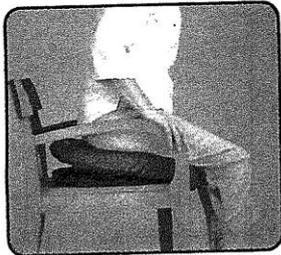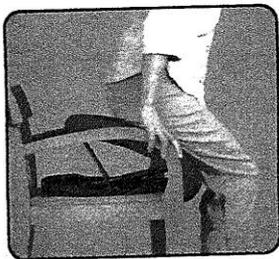

## Aufstehen mit UPEASY

Wenn Sie aufstehen wollen, stehen Sie einfach so auf wie Sie es normalerweise tun, indem Sie sich nach vorne lehnen und sich mit Ihren Armen und Beinen abstützen. UPEASY wird bemerken, daß Sie aufstehen und Sie langsam und vorsichtig nach oben heben.

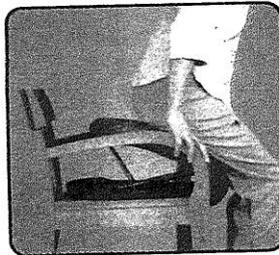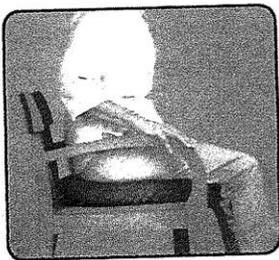


## Abnehmbarer Bezug

Das UPEASY Erhöhungskissen wird mit einem dunkelblauen, waschbaren Bezug geliefert.

### Den Bezug anbringen:

1. Stellen Sie den UPEASY auf einen Tisch mit der geöffneten Seite von Ihnen wegweisend.
2. Ziehen Sie das Ende des Bezuges mit dem Schild über die „Rück-“, bzw. „Oberseite“ des UPEASY und ziehen Sie ihn runter unter das Polster.

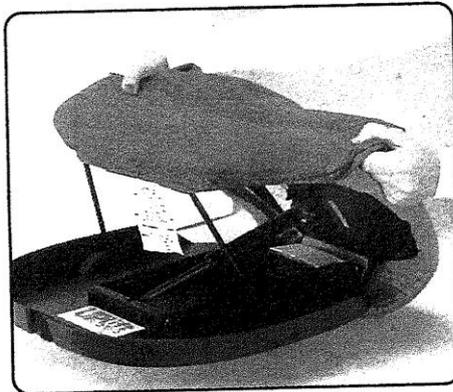

Bitte beachten Sie, daß das obere Ende des Bezuges weiter ist als das obere, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Wir empfehlen das Schild, oder zumindest einen Teil davon an dem Bezug zu lassen, um die obere Seite zu kennzeichnen.



## Anbringen im Stuhl


UPEASY sollte so wie in der Abbildung gezeigt überhängen, wenn es bei einem harten Stuhl verwendet wird.

Im allgemeinen sollte UPEASY so wie in der Abbildung gezeigt über die Vorderseite des Stuhles überhängen. Bei Stühlen, die sehr tief sind und über genügend Polsterung verfügen, kann UPEASY weiter hinten angebracht werden. Während der Betätigung von UPEASY, beide Hände auf die Armlehnen des Stuhles (oder eine andere geeignete Stütze) legen.


## Die Pflege Ihres UPEASY

Die Oberfläche des Sitzkissens ist mit einer speziellen feuerfesten, wasserabweisenden Beschichtung versehen. Die Oberfläche darf mit einem feuchten Schwamm und neutraler Seife gereinigt werden. **(Versenken Sie niemals den UPEASY komplett im Wasser.)** Der abnehmbare Bezug ist aus 100% Polyester und kann in der Maschine gewaschen und zum Trocknen aufgehängt werden.

## Vorbereitung für den Transport

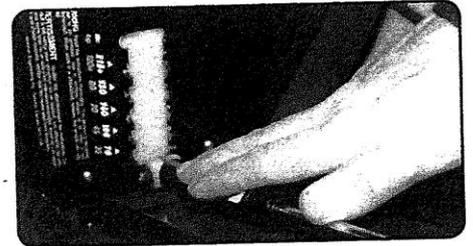

Gehen Sie so vor, als wenn Sie die Einstellung für das Gewicht regulieren. Lassen Sie den sich Kolben unter seine unterste Stellung bewegen.

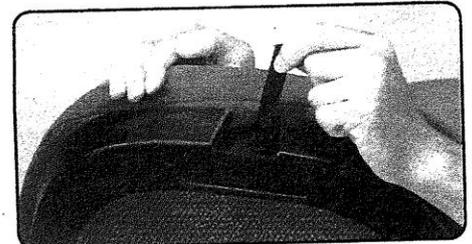

Schließen Sie UPEASY und halten Sie das Gerät mittels des Gummizuges an der Rückseite geschlossen.

## Garantie

Uplift Technologies garantiert für zwei Jahre ab dem Datum des Kaufs, daß bei m UPEASY Seat Assist Erhöhungskissen keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Die Garantie umfaßt nicht solche Schäden, die durch normalen Gebrauch und normale Abnutzung, Versäumnisse oder nicht sachgemäßen Gebrauch bedingt sind. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Bitte beachten Sie, daß die Garantie ungültig wird, wenn Sie in irgendeiner Weise versuchen, UPEASY selbst zu reparieren.

Vergessen Sie nicht, Ihre Garantiekarte noch heute abzuschicken!

## Rückgabe des Produkts

Wenn UPEASY nicht wie beschrieben funktioniert, wenden Sie sich für den Umtausch an den Fachhändler von dem Sie das Produkt gekauft haben. Ein Beleg für den Kauf ist vorzulegen.

# Sicherheitshinweise

## • Gebrauchsanweisung • Garantie


### Sicherheitshinweise

Das einzigartige, patentierte Design des UPEASY Erhöhungskissens ist ganz auf Sicherheit ausgerichtet. Auch wenn Ihr neues Produkt von UPEASY so sicher wie möglich ist, sollten Sie doch einige Sicherheitshinweise beachten:


1. Stellen Sie sicher, daß Sie sich an etwas festhalten können, wenn Sie aufstehen. Das UPEASY Erhöhungskissen ist für den Gebrauch bei Stühlen mit Armlehnen konstruiert, die über eine hinreichend stabile Sitzfläche verfügen. UPEASY läßt sich normalerweise problemlos bei weichen Stühlen, Sofas oder Couchen verwenden. Es wird davon abgeraten, UPEASY in Autos, Rollstühlen oder bei Bürostühlen zu verwenden, deren Rollen nicht blockiert werden können.
2. Vergewissern Sie sich, daß der Stuhl, bei dem UPEASY Seat Assist verwendet werden soll nicht auf dem Fußboden hin- und herrutschen kann. Sollten Sie sich dessen nicht sicher sein, stellen Sie den Stuhl mit der Rückseite gegen eine Wand oder einen anderen feststehenden Gegenstand.
3. **Wenn Sie sich vornüber beugen, um etwas aufzuheben, verlagern Sie keinesfalls das Gewicht auf Ihre Füße – andernfalls wird UPEASY aktiviert.**

### Regulierung der Gewichtseinstellung:

1. UPEASY auf die dem Griff entgegengesetzte Seite stellen.
2. Lösen Sie den Gummizug um den Griff, um den UPEASY zu öffnen.
3. Den gepolsterten Teil der Sitzfläche hinunterdrücken, wobei sich die äußere Seite senkt. Das gewährleistet die störungsfreie Funktion des Kolbens. (Die UPEASY Polsterung ist dazu konstruiert, viele tausendmal auf diese Weise behandelt zu werden. Sie nimmt daher keinen Schaden, wenn Sie sich senkt.)
4. Wählen einer Einstellung für das Gewicht. Wählen Sie eine Stellung für den Kolbenbolzen, die dem Benutzer entspricht. Vergewissern Sie sich, daß er sicher in der Öffnung der Hebevorrichtung sitzt. (Die Zahlen auf der Skala sind nur als ein Anhalt gedacht. Die von Ihnen gewählte Einstellung sollte den Fähigkeiten und Wünschen des Benutzers entsprechen. Auch eine schwächere Einstellung wird ein weiches Absenken in den Stuhl ermöglichen. Sie wird aber beim Aufstehen weniger Unterstützung geben.)

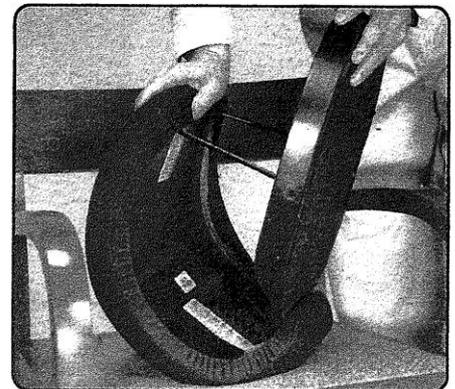

Nach UNTEN drücken, den gepolsterten Teil des Sitzes dabei beugen. Wählen Sie eine Stellung auf dem Zylinder, die dem Benutzergewicht entspricht.

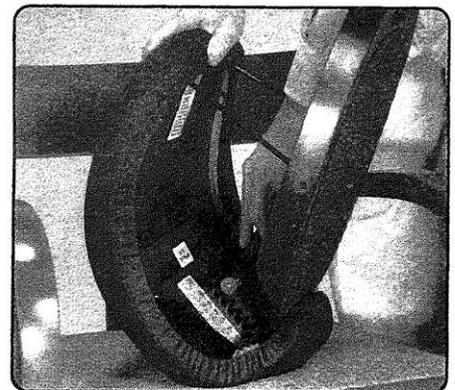

Wählen Sie eine Einstellung des Zylinders, die dem Benutzergewicht entspricht und Zentrieren Sie den Kolben in der Arretierung.

Hergestellt in China

